


## INSTRUCTIE SENSOR AANBRENGEN



Download de Syai Tag app uit de App store, Google Play of scan de QR-code op de sensorverpakking en volg de aanwijzing in de app.

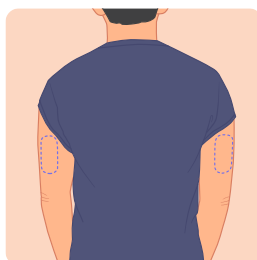

### Stap 1


Kies de achterkant van de bovenarm als de plaats voor het aanbrengen.

Let op: Vermijd plekken met littekens, moedervlekken, striae of bultjes.



### Stap 2

Reinig de plaats van aanbrengen met alcoholdoekjes. Wacht tot de huid droog is voordat u verder gaat met de volgende stap.

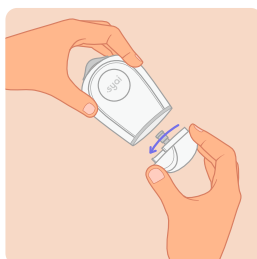

### Stap 3

Draai de onderkant van de Applicator open.

Let op: Raak de paarse knop op de bovenkant nog niet aan.



### Stap 4

Plaats de Applicator over de plaats van toepassing, druk op de startknop en verwijder voorzichtig de Applicator. De sensor moet nu bevestigd zijn aan de huid.



### Stap 5

Druk zachtjes op de plakstrook rond de rand van de sensor om deze stevig op de huid te bevestigen.

Indien gewenst kunt u de meegeleverde fixatiepleister over de sensor aanbrengen voor extra bescherming.

Zodra u klaar bent, volgt u de instructies in de App voor het activeren van de sensor.

Neem bij vragen contact met ons op via [diabetes@gdmedical.nl](mailto:diabetes@gdmedical.nl)